

Guía de autocuidado para los cambios de apósito

Su enfermera/o (o profesional sanitario) ha elegido el apósito Mepilex® Border Sacrum para su herida.

Cómo aplicar el apósito Mepilex® Border Sacrum:

1. Lávese las manos con jabón y agua tibia durante 20 segundos.
2. Limpie la herida según lo recomendado por su enfermera/o y seque completamente la piel circundante.

3. Retire el papel protector central tirando suavemente del borde fucsia.




4. Doblar el apósito con el adhesivo hacia el exterior. Extienda suavemente las nalgas y aplique el apósito para que el vértice del apósito cubra el cóccix.



5. Retire los papeles protectores laterales de uno en uno y alise el apósito sobre la piel.



6. Posición final del apósito.

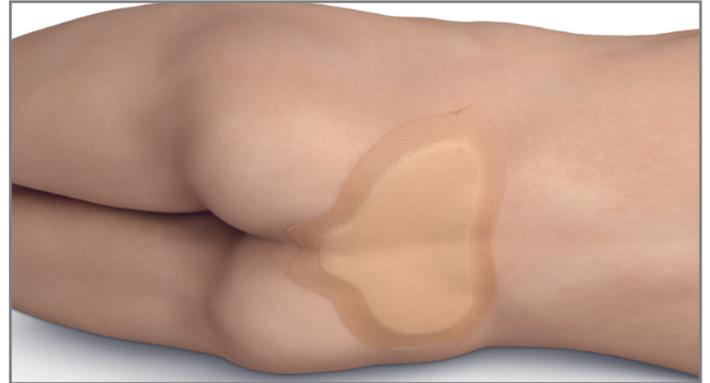

Cuándo cambiar su apósito:

El consejo de su enfermera/o es cambiar el apósito:

Para más ayuda y orientación por favor contacte con su enfermera/o:

Importante:

- ✓ Mepilex Border Sacrum es un apósito de un solo uso y no debe reutilizarse.

Puede ver el vídeo de aplicación del apósito visitando:
<https://www.molnlycke.es/nuestro-conocimiento/como-utilizar-apositos-cuidado-heridas/>

Los apósitos Mepilex Border Sacrum deben ser manipulados y aplicados por profesionales de la salud, sin embargo, si un profesional de la salud no está disponible, un miembro de su familia o usted mismo pueden hacer el cambio de apósito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad u obligación relacionada con la aplicación del apósito por parte de dichas personas. En consecuencia, si Mepilex Border Sacrum es aplicado por una persona que no es un profesional de la salud, es estrictamente bajo el propio riesgo del usuario.

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke, Av. de la Vega 15, Edif. 3 - 3ª Planta, 28108 Alcobendas (Madrid). Tel + 34 914 841 320.
Las marcas, nombres y logos de Mölnlycke y Mepilex están registradas globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.