

Guide d'auto-soins pour changer un pansement

Votre infirmier(-ère) a choisi un pansement Mextra® Superabsorbent pour votre plaie

Marche à suivre pour appliquer un pansement Mextra® Superabsorbent

1. Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon pendant 20 secondes.
2. Nettoyez la plaie en suivant les recommandations de votre infirmier(-ère).
3. Appliquez Mextra® Superabsorbent directement sur la plaie, face blanche vers le bas. La face bleue doit être visible !



4. Le coussin doit recouvrir la peau périlésionnelle sèche.



5. Fixez le pansement Mextra® Superabsorbent au moyen d'un bandage ou d'un adhésif adéquat fourni par votre infirmier(-ère).

Attention :

- Ne découpez pas le pansement Mextra® Superabsorbent
- Le pansement Mextra est à usage unique et ne peut pas être réutilisé



Quand changer votre pansement

Votre infirmier(-ère) vous conseille de changer le pansement :

.....
Pour une aide et des conseils, veuillez contacter votre infirmier(-ère) :

.....
Si vous avez accès à l'internet, voici une vidéo qui explique la marche à suivre pour appliquer le pansement (suivez le lien ou scannez le code QR avec votre téléphone) :



www.molnlycke.com/mextra-application

Le pansement Mextra® Superabsorbent doit être manipulé et changé par un-e professionnel-le de la santé, mais si aucun-e n'est disponible, un-e membre de votre famille ou vous-même pouvez être amené-e à le changer. Mölnlycke Health Care rejette toute responsabilité en ce qui concerne l'application d'un pansement par ces personnes. Par conséquent, si le pansement Mextra® Superabsorbent est appliqué par une personne qui n'est pas un-e professionnel-le de la santé, l'utilisateur-riche le fait à ses propres risques et périls.

Pour d'autres informations, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstationstraat 72 boîte 2, 2600 Berchem (Anvers), Belgique. Téléphone +32(0)3 286 89 50.
Les marques, noms et logos Mölnlycke et Mextra sont déposés par une ou plusieurs sociétés du groupe Mölnlycke Health Care pour le monde entier.
©2020 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. BFWC00082007


Mölnlycke®